

Surgical Line



OMNI-VAC

Sistema di raccolta liquidi biologici
durante l'aspirazione chirurgica


OMNI-VAC

Il sistema di raccolta liquidi biologici durante l'aspirazione chirurgica OMNI-VAC permette con una sorgente di vuoto di creare un'aspirazione chirurgica conforme alle norme vigenti, contro ogni rischio di infezione per il personale nello studio dentistico e per il paziente. Sangue, saliva, soluzione fisiologica, particelle di ossa e tessuti possono ostruire l'impianto di aspirazione. In caso di interventi di chirurgia maxillo-facciale o implantologia l'impianto di aspirazione del riunito lavora in condizioni gravose.

Un funzionamento ineccepibile è però irrinunciabile per trattamenti veloci e sicuri. Il sistema di raccolta liquidi biologici OMNI-VAC trattiene i materiali aspirati e protegge il filtro dell'impianto di aspirazione del riunito, evitando ostruzioni. Il materiale estratto rimane nella sacca di raccolta che può essere separata dal canestro e smaltita secondo le norme vigenti.

La sacca per rifiuti organici liquidi è monouso, mentre il canestro, realizzato in polycarbonato, con una gradazione precisa per il monitoraggio e la corretta misurazione del volume di liquidi raccolti, è autoclavabile a 134 °C. Il sistema di raccolta liquidi OMNI-VAC può essere collegato direttamente al riunito con i tubi di connessione in dotazione. La capacità del canestro è di 1,5 L.

Schema di montaggio

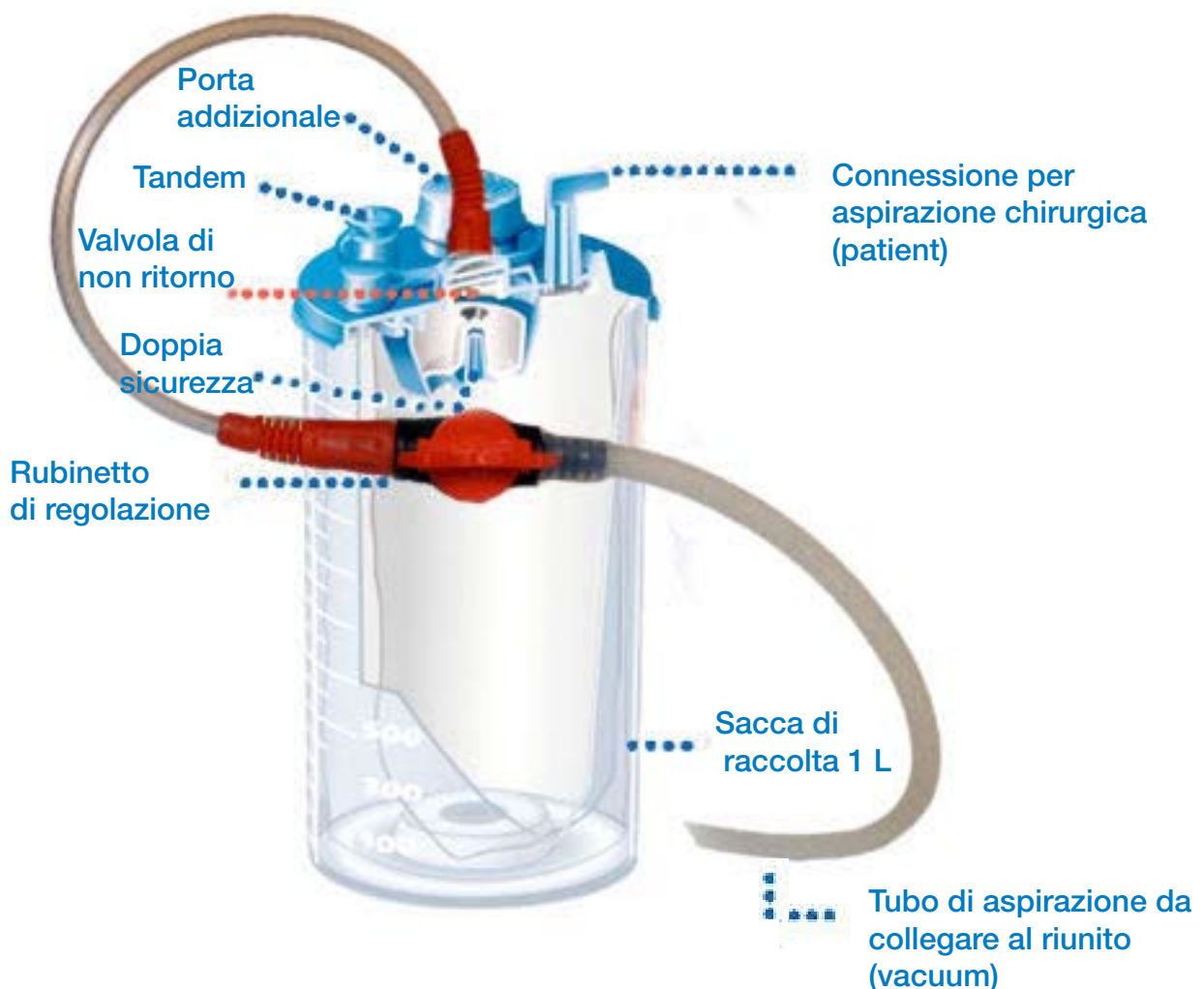

Supporto OMNI-VAC

Il supporto per OMNI-VAC è realizzato in acciaio Inox con piede su ruote. Permette il posizionamento del sistema di aspirazione OMNI-VAC con possibilità di spostamento nella saletta chirurgica.

E' possibile montare fino a 2 contenitori in connessione parallela
E' possibile utilizzare il piatto di supporto della piantana come appoggio per il Physiodispenser.



30.F2000

OMNI-VAC - Canestro per sacca di raccolta rifiuti liquidi. La confezione contiene anche 1 sacca monouso e i tubi per la connessione al riunito

30.F2001


Sacca monouso per raccolta rifiuti liquidi.
Polietilene - 10 Pz/Conf

30.E0027

Supporto removibile per canestro di raccolta rifiuti liquidi
Acciaio Inox- 1 Pz/Conf

30.E0014

Piantana supporto piatto per physiodispenser con portata di
10 kg - 1 pz/conf

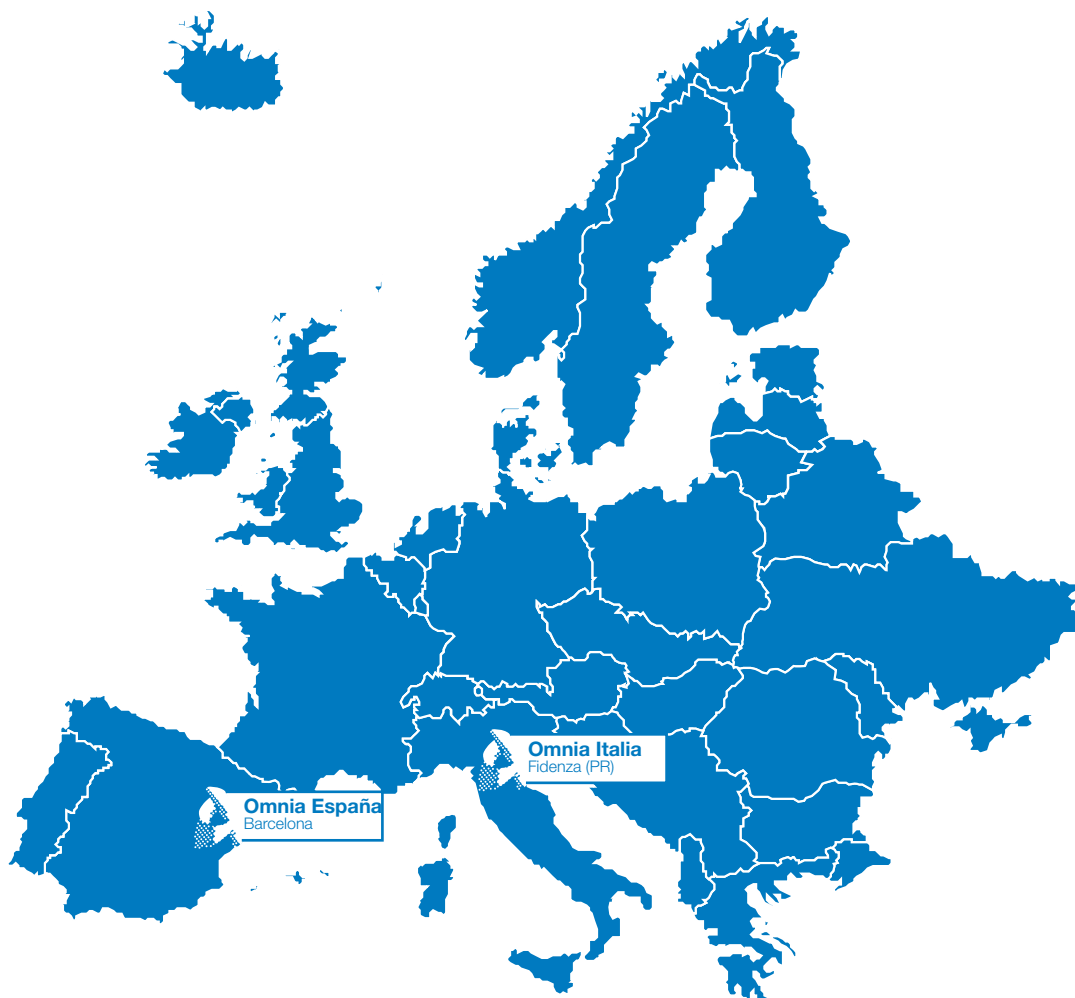

OMNIA[®]
Disposable Medical Devices

Omnia S.p.A.

Via F. Delnevo, 190sx
loc. S. Michele Campagna - 43036 Fidenza (PR) - Italy
tel +39 0524 527453 - fax +39 0524 525230
www.omniasrl.com / info@omniasrl.com

Partner **Omnia España S.L.**

Plaza Francesc Macià , 8 - 6ºD
08029 Barcelona - España
tel +34 93 405 31 19 - fax +34 93 439 31 42
www.omniaspain.com / pedidos@omnia-spain.com

